

HYALUGEL[®]

Acide Hyaluronique

FORTE SPRAY

Rétablit la santé des gencives et soulage les tissus buccaux enflammés grâce à son activité filmogène.

HYALUGEL[®] FORTE SPRAY est un dispositif médical qui adhère de façon optimale à la muqueuse gingivale pour assurer sa protection. Ses propriétés proviennent de l'utilisation de divers polymères, calibrés pour offrir d'excellentes propriétés mécaniques et une biocompatibilité. Sa composition est caractérisée par la présence d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire qui ressemble à l'acide hyaluronique naturellement présent dans le tissu gingival.

Composition : Composant principal : Hyaluronate de sodium

Autres composants : Eau, xylitol, huile de ricin hydrogénée PEG-40, benzoate de sodium, phosphate de sodium, alcool dichlorobenzyle, phosphate trisodique, lactate de sodium, EDTA disodique, alcool polyvinylique, PVP, saccharine sodique, glycérophosphocholine, arôme, carbomère (polycarophile), copolymère PVM/MA. Peut contenir de l'acide lactique, de l'hydroxyde de sodium.

Propriétés : L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire est particulièrement concentré dans les couches les plus externes du tissu gingival sain, où il contribue à la fonction de barrière, et à la résistance à la traction du ligament parodontal.

Dans les maladies parodontales et autres lésions tissulaires (états inflammatoires, poches gingivales, plaies, etc.), les besoins des tissus en acide hyaluronique augmentent considérablement (jusqu'à environ 200% par rapport aux valeurs de base), ce qui démontre son rôle dans le maintien des gencives saines. Les études cliniques montrent que l'apport d'acide hyaluronique exogène possédant des caractéristiques similaires à celles de l'actif naturel, facilite le processus naturel de cicatrisation et de récupération des tissus.

HYALUGEL[®] FORTE SPRAY, par une adhésion maximale, permet à l'acide hyaluronique (qui serait sinon éliminé par le drainage salivaire permanent) d'être maintenu in situ.

HYALUGEL[®] FORTE SPRAY est donc un produit innovant fournissant de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire à action prolongée, obtenu par un procédé biotechnologique. L'application d'acide hyaluronique procure un équilibre tissu parodontal/fluide ainsi qu'une accélération de la cicatrisation et de la réparation de tissus, en empêchant le déficit en acide hyaluronique gingival naturel de haut poids et en renforçant ses effets. L'acide hyaluronique n'induit aucun effet pharmacologique local ou systémique sur la muqueuse.

HYALUGEL® FORTE SPRAY est extrêmement sûr et ne présente pas de contre-indications ni d'effets indésirables. Il peut être utilisé chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Le profil d'innocuité de **HYALUGEL® FORTE SPRAY** est particulièrement utile lorsque l'emploi d'anti-inflammatoires est contre-indiqué. En raison des propriétés du Xylitol, un édulcorant naturel non cariogène et n'induisant pas de variations significatives de la glycémie, le produit convient aux diabétiques. Il ne présente aucune interaction médicamenteuse connue.


Indications :

États traumatiques sévères et douloureux, tels que :

- Aphtes sévères,
- Plaies ou abrasions de la bouche dues à des extractions dentaires, des interventions chirurgicales, etc.

Conseils d'utilisation : utiliser **HYALUGEL® FORTE SPRAY** après une hygiène buccale correcte et après les principaux repas, appliquer 3 à 5 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Continuer jusqu'à disparition de tous les symptômes. Éviter de manger et boire pendant au moins 30 minutes après utilisation de **HYALUGEL® FORTE SPRAY**.

1 à 2 pulvérisation(s) sur les tissus enflammés ou traumatisés. Chaque pulvérisation garantit une distribution homogène et constante du liquide sur la surface buccale. Maintenir le flacon en position verticale.

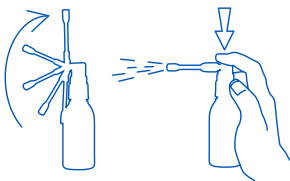

Aucun problème n'a été signalé à la suite d'une ingestion accidentelle du produit.

Contre-indications :

L'utilisation de **HYALUGEL® FORTE SPRAY** est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité aux composants de la formulation.

Précautions d'emploi et mises en garde :

Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. Conserver à température ambiante, entre 5°C et 40°C ; protéger contre les sources directes de chaleur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Après utilisation et avant de le ranger dans la boîte, éliminer tous les résidus de produit et rincer l'embout du spray. Produit réservé à un usage personnel. Garder hors de la portée des enfants. Si les symptômes persistent, consulter un professionnel de santé.

Conditionnement :

HYALUGEL® FORTE SPRAY Flacon de 20 ml Code ACL 6282976 / EAN 3614810001323

Date de révision : Mai 2020

Distribué par

**COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE**

Place Lucien Auvert
77020 Melun cedex
France

Tél : +33 (0)1 64 87 20 00

www.cooper.fr

Fabriqué par

 **RICERFARMA** s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com

Made in EU

G22203-020-08/A/A
Release May 2020 - V00

CE

0051