



HYALUGEL®

Acide Hyaluronique

1^{ères} dents



HYALUGEL® 1^{ères} dents est un gel oral constitué d'une matrice polymérique autoadhésive novatrice brevetée qui adhère de façon prolongée aux dents et aux gencives en formant un film invisible souple et résistant qui exerce une action protectrice efficace.

Indications :

Inflammations des gencives spécifiques de la petite enfance, telles celles liées aux poussées dentaires des nourrissons ou aux traumatismes. Les essais cliniques démontrent que l'application de **HYALUGEL® 1^{ères} dents** réduit la douleur, le gonflement et favorise la cicatrisation.

Mode d'emploi :

Après un soigneux lavage des mains, prendre une faible quantité de **HYALUGEL® 1^{ères} dents** avec un doigt et masser délicatement la gencive jusqu'à ce que la zone affectée soit entièrement recouverte. Appliquer de préférence après les repas et avant de coucher l'enfant pour favoriser la formation du film et prolonger le soulagement ainsi procuré. Utiliser 3 à 6 fois par jour, ou au besoin.

Composition :

Composant principal : hyaluronate de sodium.

Autres composants : eau, PEG 400, xylitol, alcool polyvinylique, carbométhylcellulose sodique, huile de ricin hydrogénée PEG 40, polyvinylpyrrolidone, copolymère de méthyle vinyle éther et d'acide malique, copolymère de vinylpyrrolidone et d'eicosène, laurate de

glycéryle, carbomère (polycarbophile), saccharinate de sodium, phosphate de sodium, alfoscérate de choline, phosphate trisodique, lactate de sodium, éthylène diamine tétraacétique. (Peut contenir de l'acide lactique et de l'hydroxyde sodium.)

HYALUGEL® 1^{ères} dents permet de réduire l'utilisation de médicaments tels que les anesthésiques locaux.

Le goût de **HYALUGEL® 1^{ères} dents** est agréable. Il ne contient pas d'alcool, ni sucre ou arôme artificiel, ni conservateur, ni gluten, lactose, parabènes, Laurylsulfate de sodium ou OGM.

HYALUGEL® 1^{ères} dents a été testé cliniquement pour les enfants en bas âge.

Contre-indications :

L'utilisation de **HYALUGEL® 1^{ères} dents** est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

Précautions d'emploi et mises en garde :

Si **HYALUGEL® 1^{ères} dents** doit être utilisé en même temps que d'autres produits, consulter votre médecin.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Ne pas utiliser **HYALUGEL® 1^{ères} dents** si le tube est déjà ouvert ou endommagé avant sa première utilisation. Stocker à température ambiante (entre 5°C et 40°C), protéger des sources directes de chaleur.

Ne pas utiliser après la date de péremption. Avant de fermer le tube après utilisation, éliminer tous les résidus. Ne pas laisser à la portée des enfants. Produit à usage personnel.

Conditionnement :

HYALUGEL® 1^{ères} dents : tube de 20 ml

Code ACL 6007216 / EAN 3504105029388

Date de révision : Avril 2019

Distribué par :

**Coopération Pharmaceutique
Française**

Place Lucien Auvert
77020 Melun cedex
France

Tél : +33 (0)1 64 87 20 00

www.cooper.fr

Fabriqué par :



Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU

MC400199FR/FB - V01