



Rétablit la santé des gencives et apaise les tissus buccaux enflammés et traumatisés, grâce à son activité filmogène.

Le changement rapide et continu de la forme de la cavité buccale, de l'âge pédiatrique à l'adolescence, nécessite un renouvellement accéléré des tissus parodontaux, en particulier de la muqueuse. L'acide hyaluronique, constituant naturel de ces tissus, indispensable au maintien de l'équilibre fonctionnel requis pour l'échange intercellulaire, est particulièrement concerné par ces changements. En particulier, les changements hormonaux de l'adolescence causent souvent une diminution de la teneur en acide hyaluronique, avec pour conséquence une réduction du niveau de protection apporté par la muqueuse.

HYALUGEL[®] ADO est un dispositif médical contenant de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire (HP) (sous forme d'hyaluronate de sodium), obtenu par un procédé biotechnologique garantissant un haut niveau de pureté.

L'application d'acide hyaluronique assure l'équilibre liquides/tissus parodontaux et prévient le déficit en acide hyaluronique HP gingival naturel, renforçant ses effets. **HYALUGEL[®] ADO** n'induit aucun effet pharmacologique local ou systémique sur la muqueuse. L'acide hyaluronique subit une dépolymérisation importante et est réduit à ses composants de base sous l'action de l'enzyme bactérienne de la plaque.

Composition : Composant principal : hyaluronate de sodium. Autres composants : eau, xylitol, carboxyméthylcellulose sodique, huile de ricin hydrogénée PEG40, laurate de glycéryle, arôme, carbomère (polycarboophile), acide lactique, saccharinate de sodium, EDTA disodique, hydroxyde de sodium.

Propriétés : La formulation de **HYALUGEL[®] ADO** contient de l'acide hyaluronique qui ressemble à celui que l'on retrouve dans le tissu gingival.

HYALUGEL[®] ADO est extrêmement sûr et est exempt d'effets secondaires. L'absence de conservateurs, d'alcool ou de colorants réduit considérablement le profil toxicologique et le potentiel de lésion tissulaire de **HYALUGEL[®] ADO**, et la substitution des édulcorants cariogènes par du xylitol, un composant abaissant le pH local et entravant donc la prolifération des micro-organismes, le rend particulièrement adapté aux patients les plus sensibles au risque toxicologique et les plus exposés aux agents cariogènes (par exemple les enfants).

La formule de **HYALUGEL® Ado** a été développée pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents ; les constituants de la formulation sont totalement sûrs du point de vue toxicologique et son agréable goût de chewing-gum est tout spécialement conçu pour plaire aux 7 -14 ans.

Le profil d'innocuité du produit est particulièrement utile lorsque l'emploi d'anti-inflammatoires est contre-indiqué. En raison des propriétés du xylitol, un édulcorant naturel non cariogène et n'induisant pas de variations significatives de la glycémie, ce produit convient également aux diabétiques. Il ne présente aucune interaction médicamenteuse connue.

L'innocuité de **HYALUGEL® Ado** est le résultat d'une formulation d'avant-garde qui en fait un produit spécifique pour le traitement des états inflammatoires des gencives des adolescents.

Le produit se caractérise par une formule :

- SANS CONSERVATEURS
- SANS ALCOOL
- SANS COLORANTS
- SANS SUCRE

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 30 mois.

Indications : états inflammatoires (gingivites, saignements, récessions gingivales, poches gingivales) ou états traumatiques (notamment aphtes, **plaies causées par le port d'appareils orthodontiques**, nettoyage, abrasion, extractions dentaires, séquelles post-chirurgicales), et états où la muqueuse gingivale requiert une augmentation en acide hyaluronique.

Mode d'emploi : après une hygiène buccale correcte, appliquer **HYALUGEL® Ado** 3 à 5 fois par jour (après les principaux repas) et poursuivre le traitement jusqu'à disparition complète des symptômes.

Appliquer une fine couche de gel sur le tissu gingival et masser délicatement avec un doigt propre pour bien répartir le produit sur la muqueuse.

Éviter de manger et boire pendant au moins 30 minutes après application.

Aucun problème n'a été rapporté après l'ingestion accidentelle du produit.

Contre-indications : hypersensibilité individuelle avérée aux composants de la formulation.

Précautions d'emploi et mise en garde : ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.

Conserver à une température ambiante entre 5°C et 40°C ; protéger contre les sources directes de chaleur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Avant de refermer le tube, éliminer tous les résidus. Produit pour usage personnel. Garder hors de la portée des enfants. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de santé.

Conditionnement :

HYALUGEL® Ado Gel : tube de 20 ml

Date de modification : Avril 2019

Code ACL 2069846 / EAN 3401020698463

Distribué par

**COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE**

Place Lucien Auvert
77020 Melun cedex
France

Tél : +33 (0)1 64 87 20 00
www.cooper.fr

Fabriqué par

 **RICERFARMA** s.r.l.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU

MC400164FR/G/C - V01